



SILIPACK **iOOX** CREMA DE SILICONA

Formulado a base de silicona, está indicada para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Crema de silicona hidratante y regeneradora.

REGENERADOR CUTÁNEO

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE



Silipack I00X® Crema

Complejo formado por emulsión de siliconas para la reducción de cicatrices hipertróficas, recientes o antiguas, y para la reducción de queloides debidos a cirugía general o reconstructora, queloides producidos por quemaduras o queloides producidos por heridas traumatológicas.

INDICACIONES:

Silipack I00X® Crema es indicado para la reducción de cicatrices y queloides.

Se utiliza para aplanar el tejido de la cicatriz, aumentar su elasticidad y reducir los cambios de coloración, independientemente del grado o el lugar donde se encuentre, mejorando visiblemente su aspecto. Mejora la elasticidad y reduce las imperfecciones de la piel.

MODO DE EMPLEO:

Lavar la zona afectada y secar bien. Aplicar diariamente una gota de producto sobre la cicatriz y realizar un masaje con movimientos circulares durante 10 minutos. Repetir seguidamente dicho proceso 2 veces más hasta un tiempo total de 30 minutos por sesión. Aplicar el tratamiento 1 ó 2 veces al día. Realizando esta pauta durante 3 ó 4 meses, se consigue una mejora considerable en las imperfecciones de la piel.

INGREDIENTES:

Dimethicone, Cyclomethicone, Tocopheryl acetate.

COMPOSICIÓN:

SILICONA	99%
VITAMINA E	1%

PRESENTACIÓN: Tubo de 30 ml

C.N. 238758.4

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar por debajo de 25°C y alejado de las fuentes de calor.
- No utilizar después de la fecha de caducidad () impresa en el envase.
- No aplicar en heridas abiertas.
- No debe entrar en contacto con membranas mucosas, ni debe ser aplicado cerca de los ojos.
- No debe aplicarse sobre otros tratamientos para la piel sin consultar con el médico.

EFFECTOS ADVERSOS

Raramente, la crema puede causar enrojecimiento, dolor o irritación de la piel. Si está preocupado por éstos u otros efectos adversos, consulte con su farmacéutico o médico.


PROMOENVAS, S.A.
Calle San Antón 4 Planta 1 Oficina 5
18005 Granada (España)
www.iooxlabs.com



ioox®

PROMOENVAS, S.A.
Calle San Antón 4 Planta 1 Oficina 5
18005 Granada (ESPAÑA) www.iooxlabs.com